

KIT DE ELECTRODOS ADULTO CPR-D-PADZ® CON REAL CPR HELP®

8900-0800-01

Compatibilidad DEAs:

AED Plus®, AED Pro®, Zoll AED 3®,
Zoll AED 3 BLS®

Compatibilidad Desfibrilador Monitor:

R Series®, Propaq® MD, X Series®



DESCRIPCIÓN

Una almohadilla de electrodo es más fácil que dos


Los DEA de rescate completo de ZOLL cuentan con CPR-D-padz®, un electrodo preconectado de una pieza con retroalimentación Real CPR Help®.

Los DEA ordinarios requieren que el reanimador use dos electrodos separados. Al usar la colocación de la mano de CPR como punto de referencia, es fácil colocar rápidamente el CPR-D-padz en la víctima. El CPR-D-padz también dura cinco años, la vida útil más larga de todos los electrodos de desfibrilador vendidos en la actualidad.

Ayuda real de RCP

La frecuencia y la profundidad de compresión inadecuadas son comunes durante la RCP. Las víctimas adultas necesitan al menos 100 compresiones por minuto ya una profundidad de al menos 2 pulgadas (5 cm). Las compresiones deben hacerse bien para mover eficazmente la sangre y el oxígeno.

El ZOLL AED Plus® convierte instantáneamente los datos de compresión del CPR-D-padz y proporciona un metrónomo adaptable para ayudar al reanimador con la frecuencia y la profundidad adecuadas, diciendo "Empuje más fuerte" o "Buenas compresiones", según sea necesario. También muestra la profundidad de compresión de la RCP en la pantalla.

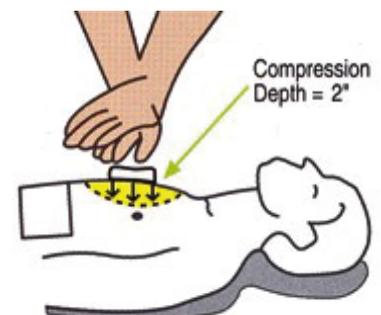

AED Plus de ZOLL es el único DEA que ayuda al reanimador a lograr la frecuencia y la profundidad correctas de las compresiones torácicas durante la RCP. Ningún otro DEA tiene estas capacidades.

RCP transparente

El CPR-D-padz viene completo con una máscara de barrera para RCP, tijeras, guantes desechables, una maquinilla de afeitar, una toalla y una toallita húmeda.

- ✓ Aplicación: Acceso público, EMS - Resucitación
- ✓ Mercados: EMS & FIRE, Hospital, Militar, Seguridad Pública
- ✓ Tipo de gel: Sólido
- ✓ Tiempo de estimulación: N/A
- ✓ Tipo de conductor: Estaño
- ✓ Pre-conexión: Sí
- ✓ Caducidad (meses): 60
- ✓ Longitud del cable conductor (longitud total/sello al conector): 40,00"/16,00"
- ✓ Tipo de paciente: Adulto
- ✓ Tipo de conexión: conector verde AED
- ✓ Conector requerido: Para la serie R: 8000-000863-40, 8009-0749 o 8009-0750 con adaptador 8009-0020, para la serie X: 8300-000831-40 o 8300-000676 con adaptador 8000-0370. Para Propaq MD 8300-0783 con adaptador 8000-0370.

ÁPICE / ALMOHADILLA FRONTAL

- ✓ Forma: Rectángulo
- ✓ Longitud: 6,13"
- ✓ Ancho: 5,25"
- ✓ Área (pulgadas cuadradas): 32,00"
- ✓ Gel conductor forma: Rectángulo
- ✓ Longitud del gel conductor: 4,50"
- ✓ Ancho del gel conductor: 4.31"
- ✓ Área de gel conductor (pulgadas cuadradas): 19,40"

ALMOHADILLA DE ESTERNÓN / ESPALDA

- ✓ Forma: Rectángulo
- ✓ Longitud: 6,06"
- ✓ Ancho: 5,00"
- ✓ Área (pulgadas cuadradas): 30,30"
- ✓ Gel conductor forma: Rectángulo
- ✓ Longitud del gel conductor: 4,50"
- ✓ Ancho del gel conductor: 4,31"
- ✓ Área de gel conductor (pulgadas cuadradas): 19,40"

Todas las unidades en pulgadas.

AED Plus, AED Pro, CPR-D-padz, E Series, M Series, OneStep, Pedi-padz, Pro-padz, R Series, Real CPR Help, Stat-padz, X Series y ZOLL son marcas comerciales o marcas registradas de ZOLL Medical Corporation en los Estados Unidos y/u otros países. Propaq es una marca registrada de Welch Allyn. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños.



ZOLL®